

Link do produktu: <https://energodom.pl/alkomat-cyfrowy-elektroniczny-tester-trzezwosci-ld-promile-ustniki-p-3914.html>

ALKOMAT CYFROWY Elektroniczny TESTER TRZEŻWOŚCI Ld Promile + USTNIKI

Cena brutto	21,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALP-T-496
Kod producenta	ALP-T-496
Kod EAN	5907080904905

Opis produktu

ALKOMAT CYFROWY Elektroniczny TESTER TRZEŻWOŚCI Ld Promile + USTNIKI

- Precyzyjny i dokładny czujnik
- Ustnikowy
- Czytelny wyświetlacz LCD
- Szeroki zakres pomiarowy
- Łatwy w obsłudze
- Poręczny, niewielki rozmiar
- Detekcja wydechu kontrolująca poprawność pomiaru
- Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów
- Forma breloku

Specyfikacja :

- Sensor: Półprzewodnikowy
- Zakres pomiaru (min.): 0.00 - 0.19 %

- Zakres pomiaru (min.): 0.00 - 1.9 g/l
- Dokładność pomiaru: 0.01 %
- Czas przygotowania: 10 s
- Czas pomiaru: 6 s
- Wyświetlacz: LCD
- Detekcja wydechu kontrolująca poprawność pomiaru
- Żywotność czujnika: 1000 razy
- Automatyczne wyłączanie
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: 0-40°
- Temperatura przechowywania: -20 do 60°
- Zasilanie : Baterie/akumulatory 2xAAA (brak w zestawie)
- Wymiary: 11 x 6,8 x 2,2 cm
- Instrukcja w j. polskim
- Deklaracja CE, RoHS
- Instrukcja Bezpieczeństwa
- Kod producenta: ALP-T-496

□ Precyzyjny i dokładny

Alkomat wyróżnia się technologią, która zapewnia wysoką dokładność wyświetlanych wyników i zwiększa odporność sensora na uszkodzenia spowodowane wysoko stężonymi oparami.

□ Łatwy w obsłudze

1. START Przycisk zasilania - Przytrzymaj aby włączyć lub wyłączyć
2. ROZRUCH Po włączeniu alkomatu, urządzenie wyda krótki dźwięk oraz rozpocznie odliczanie 10 sekund (jest oto czas przygotowania urządzenia do pomiaru).
3. ROZPOCZĘCIE TESTU Po upływie 10 sekund testu urządzenia automatycznie rozpocznie się pomiar trwający 6 sekund, wynik zostanie wyświetlony zaraz po teście. Podczas odliczania obejmij ustami ustnik. Wydech powinien być ciągły z tym samym natężeniem.

TEST NIEUDANY

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Err”. Wtedy test jest niepoprawny, powtórz test dmuchając dokładniej.

TEST POZYTYWNY (WYŚWIETLENIE WYNIKÓW)

Jeżeli pomiar zakończy się pomyślnie, na wyświetlaczu pojawi się stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu (mg/L i niewykryte) (Ostrzeżenie) (Niebezpieczne) i automatycznie wyłączy zasilanie.